



## Unsere Leistung

Ob Inlay, Krone, Brücke, Implantatversorgung oder Prothese – mit NOVADENT können Patienten erheblich bei ihrer privaten Zuzahlung sparen und das ohne Abstriche bei der Qualität.

## Gerade Zähne Step by Step

NOVAProSmile® ist ein speziell für die Behandlung von Erwachsenen entwickeltes, diskretes und bezahlbares Zahnkorrektursystem. Zahnfehlstellungen werden mit individuell gefertigten, nahezu unsichtbaren Kunststoffschienen sanft in die gewünschte Form gebracht.



Ein besonderer Service ist unsere ausführliche Patientenberatung – entweder über die **kostenlose Beratungshotline 0800 - 860 86 86** oder an unserem Stammsitz in Hamburg.

NOVADENT Dentaltechnik-  
Handelsgesellschaft mbH  
Straßenbahnring 3  
20251 Hamburg  
Telefon: 040 - 532 81 800  
Fax: 040 - 531 13 32

Terminvereinbarung unter: 0800 - 860 86 86\*  
[www.novadent.de](http://www.novadent.de)

\*gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

**NOVADENT®**  
Schöne Zähne für alle.

# Schiefe Zähne?

”  
Fragen Sie  
gleich Ihren  
Zahnarzt  
“

NOVAProSmile®

## Warum NOVAProSmile®

Statt auf Metall und Draht setzt NOVAProSmile®, zur Korrektur von Zahnfehlstellungen im Frontzahnbereich, auf modernste digitale Technologien und erprobte, fortschrittliche und effektive Methoden.

NOVAProSmile® ist eine besonders ästhetische und komfortable Lösung, die Sie unauffällig durch Ihren Alltag begleitet.



vorher



nachher



vorher



nachher

## So funktioniert's:

NOVADENT erstellt auf Basis Ihrer Abdrücke einen Behandlungsplan und errechnet die Anzahl der notwendigen Steps zu Ihrem Wunschlächeln.


NOVADENT fertigt Ihre individuellen Schienen.

Sie tragen täglich die Zahnkorrekturschienen, wie vom Ihrem Zahnarzt angegeben, für gewöhnlich 20-22 Std. am Tag und Ihre Zähne werden sanft in die gewünschte Richtung korrigiert.




1

Anamnese / Vorgespräch.  
Ihr Zahnarzt diagnostiziert Ihre Zahnfehlstellung und prüft, ob NOVAProSmile® für Sie geeignet ist.

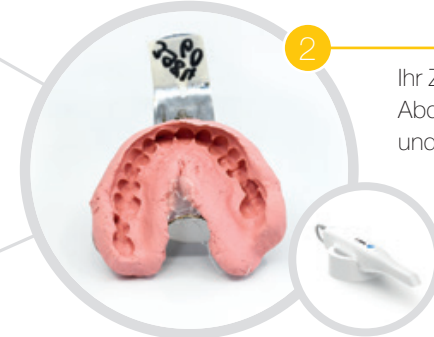


2

Ihr Zahnarzt nimmt einen Abdruck von Ihrem Ober- und Unterkiefer.

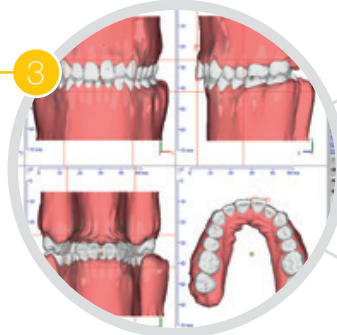

3

NOVADENT erstellt auf Basis Ihrer Abdrücke einen Behandlungsplan und errechnet die Anzahl der notwendigen Steps zu Ihrem Wunschlächeln.

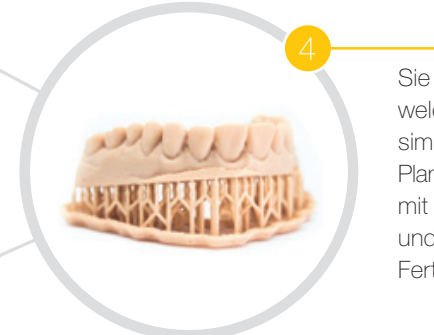

4

Sie erhalten ein 3D Modell, welches das Endergebnis simuliert, und eine genaue Planung. Ihr Zahnarzt bespricht mit Ihnen die Behandlung und die Kosten. Sie geben die Fertigung in Auftrag.



5

NOVADENT fertigt Ihre individuellen Schienen.



6

Ihr Zahnarzt übergibt Ihnen das NOVAProSmile® Schienenset und überprüft die Passung.



7

Sie tragen täglich die Zahnkorrekturschienen, wie vom Ihrem Zahnarzt angegeben, für gewöhnlich 20-22 Std. am Tag und Ihre Zähne werden sanft in die gewünschte Richtung korrigiert.

” Fragen Sie gleich Ihren Zahnarzt “